

Maria

grūtniecības testi

Precizitāte vairāk kā **99%!**

Grūtniecības agrīnajā stadijā apaugļotā olšūna izdala īpašu hormonu, HCG (Cilvēka horioniskais gonadotropins), kas nokļūstot urīnā darbojas kā grūtniecības indikators. Ar "Maria" testu palīdzību grūtniecība tiek noteikta ļoti agrīnā stadijā - apmēram 10 dienas pēc olšūnas apaugļošanās. Izmantojot testus "Maria", rezultātu var iegūt 3 - 10 minūšu laikā.



Maria Plus

ir taisnstūrveida plate, kurai ar pipeti jāuzpilina trīs pilieni urīna. Šķidrums izplūst lodzinā, nonāk līdz reaģenta slānim, un sākas ķīmiskā reakcija. Kreisajā pusē jānolasa rezultāts.

[Instrukcija >>](#)



Maria Strip

ir īpaša, ar reaģentu piesūcināta papīra strēmelīte, kas rezultāta iegūšanai ir jāiemērc urīnā. Pēc ķīmiskās reakcijas beigām lodziņā parādīsies viena vai divas sarkanas josliņas - tas arī būs rezultāts.

[Instrukcija >>](#)



Maria Ultra

ir glāze ar testēšanas plāksnīti. Jāsavāc urīnu glāzē, un testa rezultāts parādīsies tās sānu lodziņā.

[Instrukcija >>](#)